


Prestan Reanimatiepop geschikt voor EHBO-examen Oranje Kruis

Voor het EHBO-examen van het Oranje Kruis is het nodig dat de Prestan reanimatiepop geen ondersteuning biedt aan de examenkandidaat. Het is mogelijk om bij de Prestan reanimatiepop de compressie-frequentie en diepte-ondersteuning tijdelijk uit te schakelen.

Dit doet u als volgt:

Stap 1.

Verwijder het hoofd van de reanimatiepop en draai de pop op de buik.

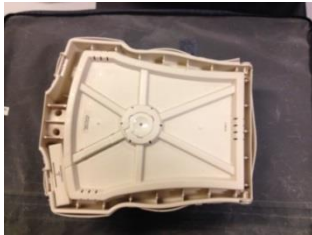

Stap 2.

Verwijder het beschermkapje met een schroevendraaier op de daarvoor aangegeven locatie.




Klik de verbindingstekker los.



Stap 4.

Klik vervolgens het klikker mechanisme los met een schroevendraaier op de daarvoor aangegeven locatie(s) en haal deze eruit.

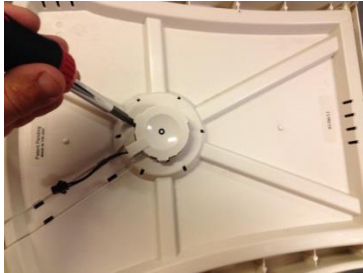

Stap 5.

Breng het beschermkapje terug op zijn plaats om de kabel te beschermen. Deze is verbonden met het batterij compartiment.



Zet het hoofd en long terug in de pop.

De Prestan reanimatiepop is klaar voor het EHBO examen.

Voor het opnieuw activeren van de reanimatieondersteuning volgt u stap 1 t/m 5 in omgekeerde volgorde.

Om het gebruik van de Prestan reanimatiepop compleet te maken, kunt u de pop aanvullen met de Prestan AED trainer. Deze sluit naadloos aan op de Prestan reanimatiepop.

Voor informatie:

RescueMate / AED Solutions bv.

Wilhelminastraat 17
6039 AB Stramproy

☎: 0495 – 563 445

✉: info@rescuemate.eu

